



SILHOUETTE SOFT®

CONNECT THE DOTS, RECONNECT YOUR LIFE.

DER RESORBIERBARE FADEN MIT  
BIDIREKTIONALEN CONES

## Qualitätsindikatoren

- “ 7 Jahre Erfahrung in plastischer und rekonstruktiver Chirurgie
- “ Made in USA
- “ FDA & CE-Zulassung für den US-Markt & den Europäischen Markt (Silhouette Lift® & Silhouette Soft®)
- “ ISO-Zertifizierung


## Vertriebsindikatoren

- “ Weltweiter Vertrieb (55 Länder)
- “ Anwenderschulungen
- “ Medizinischer Support
- “ Verkauf nur nach Hands-On Training



## DIE CONES - TECHNOLOGIE

- Silhouette Soft sind die einzigen Fäden mit resorbierbaren Cones (Kegel)
  - die gesamte Oberfläche der Cones ist glatt => Patienten spüren kein Kribbeln
  - 360° Oberfläche sorgt für starke Fixierung im subkutanen Gewebe
  - fibröse Kapselbildung um die Cones bildet ein solides Stützgerüst im Weichgewebe
- => Keine Migration**
- => Keine Extrusion**

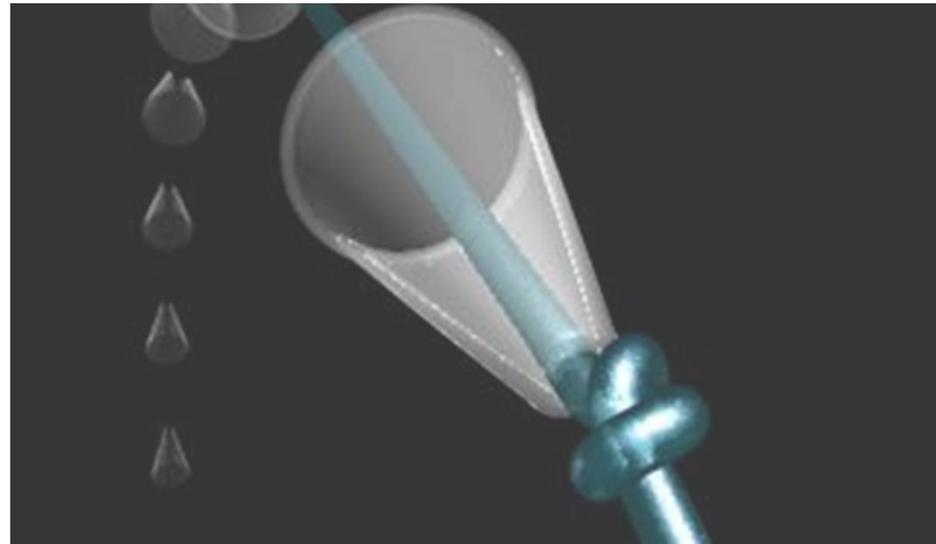

1 BEHANDLUNG

## 2 EFFEKTE

### LIFTING-EFFEKT

#### **Lifting-Effekt für sofortige und diskrete Ergebnisse**

Sofort nach der Behandlung kann der Arzt den betreffenden Bereich mithilfe der bidirektionalen Cones durch Kompression des Gewebes und Liftens der Haut definieren.

### REGENERATIVER VOLUMEN-EFFEKT


#### **Regenerativer Volumen-Effekt für graduelle und natürliche Ergebnisse**

Durch den Abbau des Produkts agiert die Polymilchsäure im subkutanen Gewebe und stimuliert die Fibroblasten zur Produktion neuen Kollagens. Kontur und Volumen des Gesichts werden wiederhergestellt.



PRODUKT-  
SPEZIFIKATIONEN

- ❑ Bidirektionaler Faden – manuelle Fertigung
- ❑ 4, 6 oder 8 Cones je Seite
- ❑ Fäden und Cones sind vollständig resorbierbar

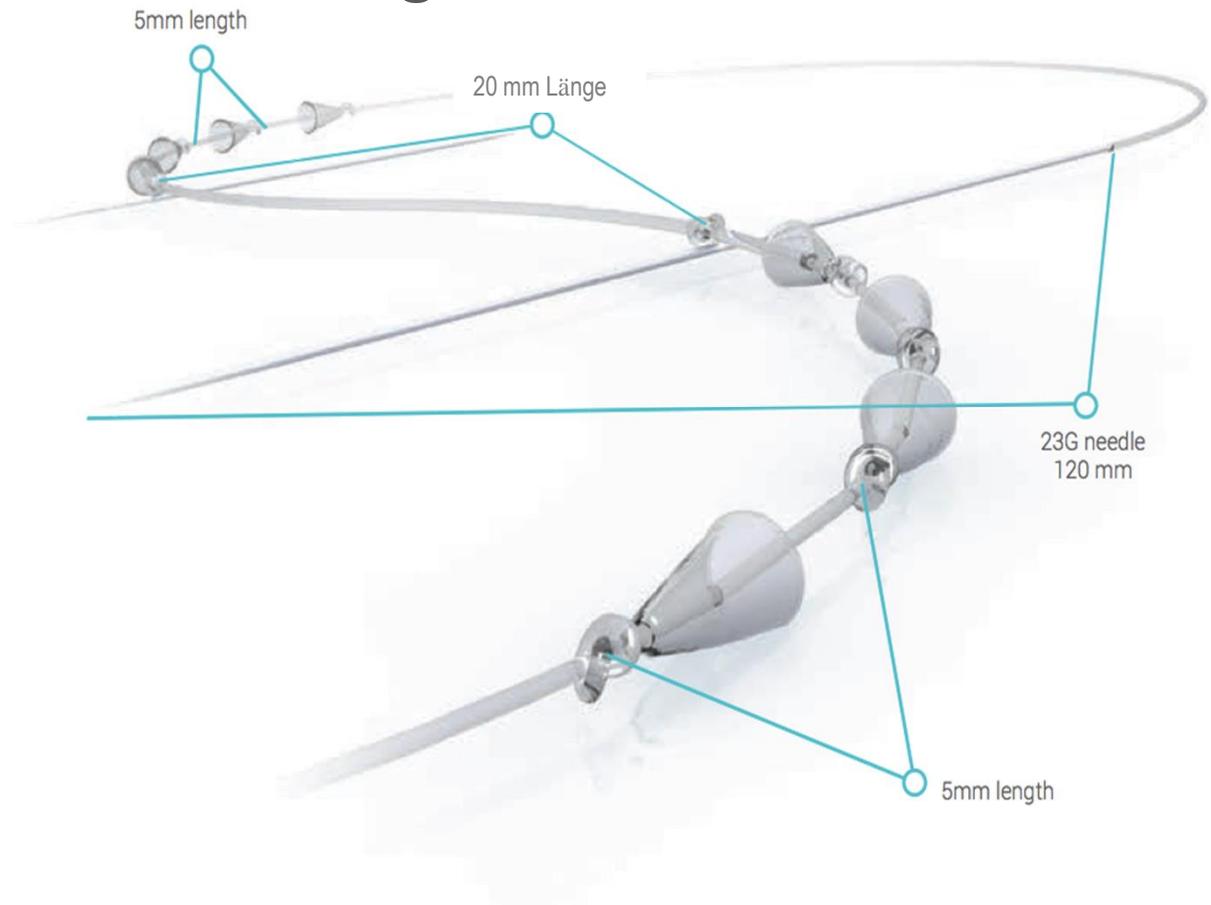

**Indikation****Behandlung****Ergebnis**


LHOUETTE SOFT®

Gesichtskonturierung	2 oder 3 Fäden pro Seite	Die Gesichtskontur wird verfeinert
Unterkiefer/Wangen	2 Fäden pro Seite	Wangenvolumen wird definiert und die Gesichtskonturen wirken klarer
Wangen und Wangenknochen	2 Fäden pro Seite	Wangen und Wangenknochen wirken voluminöser. Die Nasolabialfalte ist weniger ausgeprägt .
Augenbrauen	1-2 Fäden pro Augenbraue	Die Außenseite der Augenbraue wird etwas angehoben, die Augen sind weiter geöffnet
Hals	2 oder 3 Fäden pro Seite	Die Haut wird gestrafft und gewinnt ihre Spannkraft zurück.



# LINEARE TECHNIK

  
SILHOUETTE SOFT®

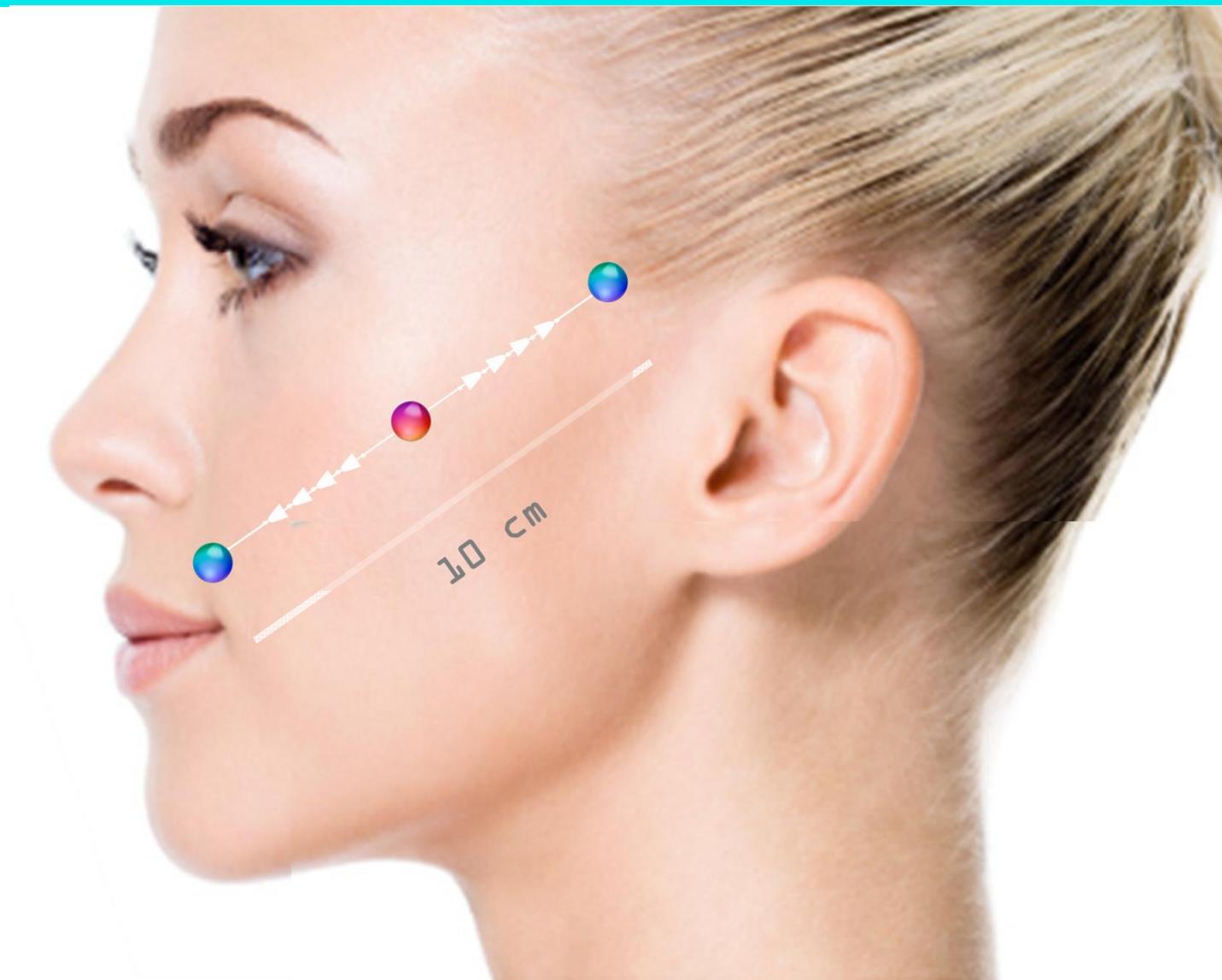


# WINKEL


  
SILHOUETTE SOFT™



# KOMBINIERTE TECHNIK

  
SILHOUETTE SOFT™

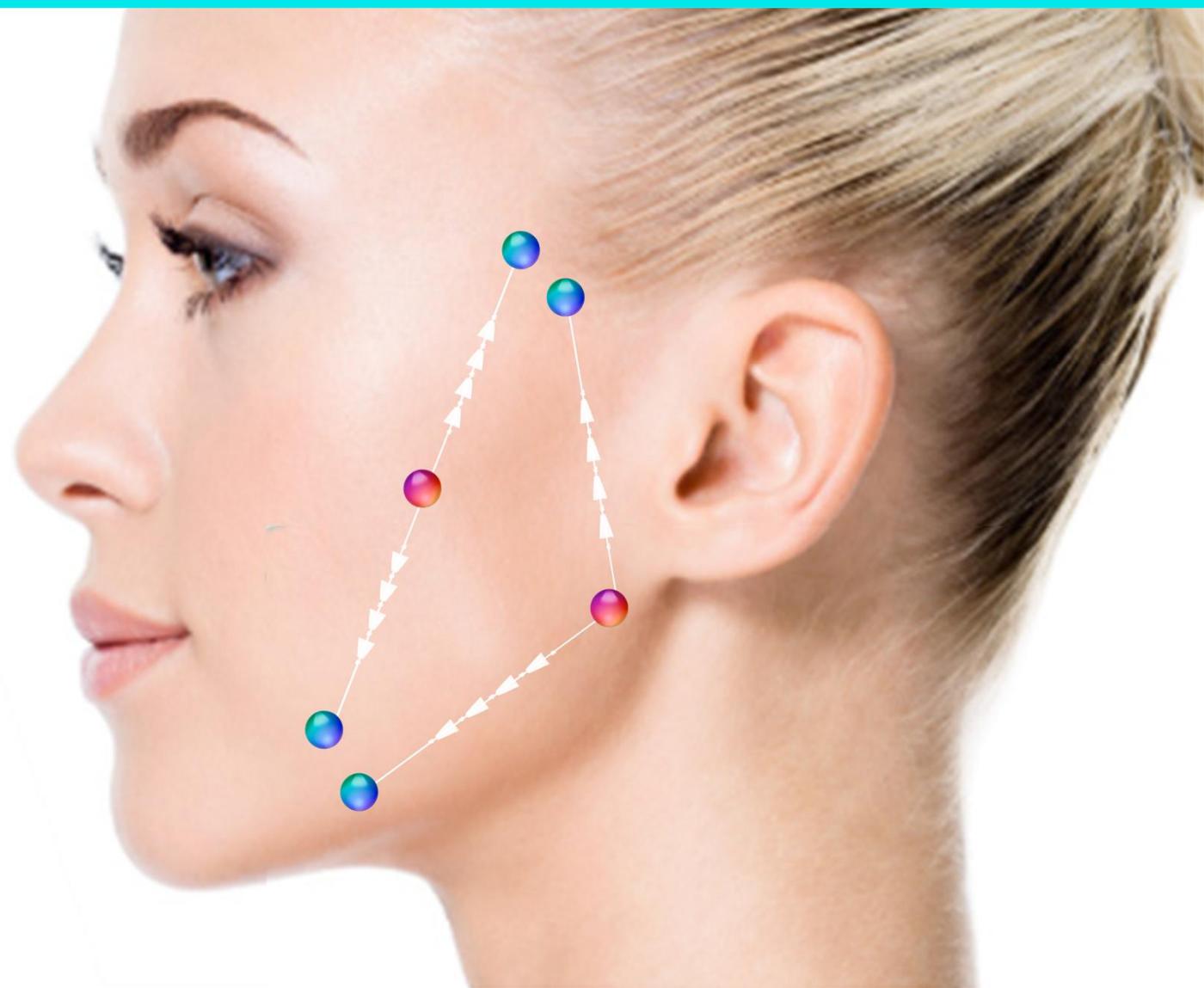


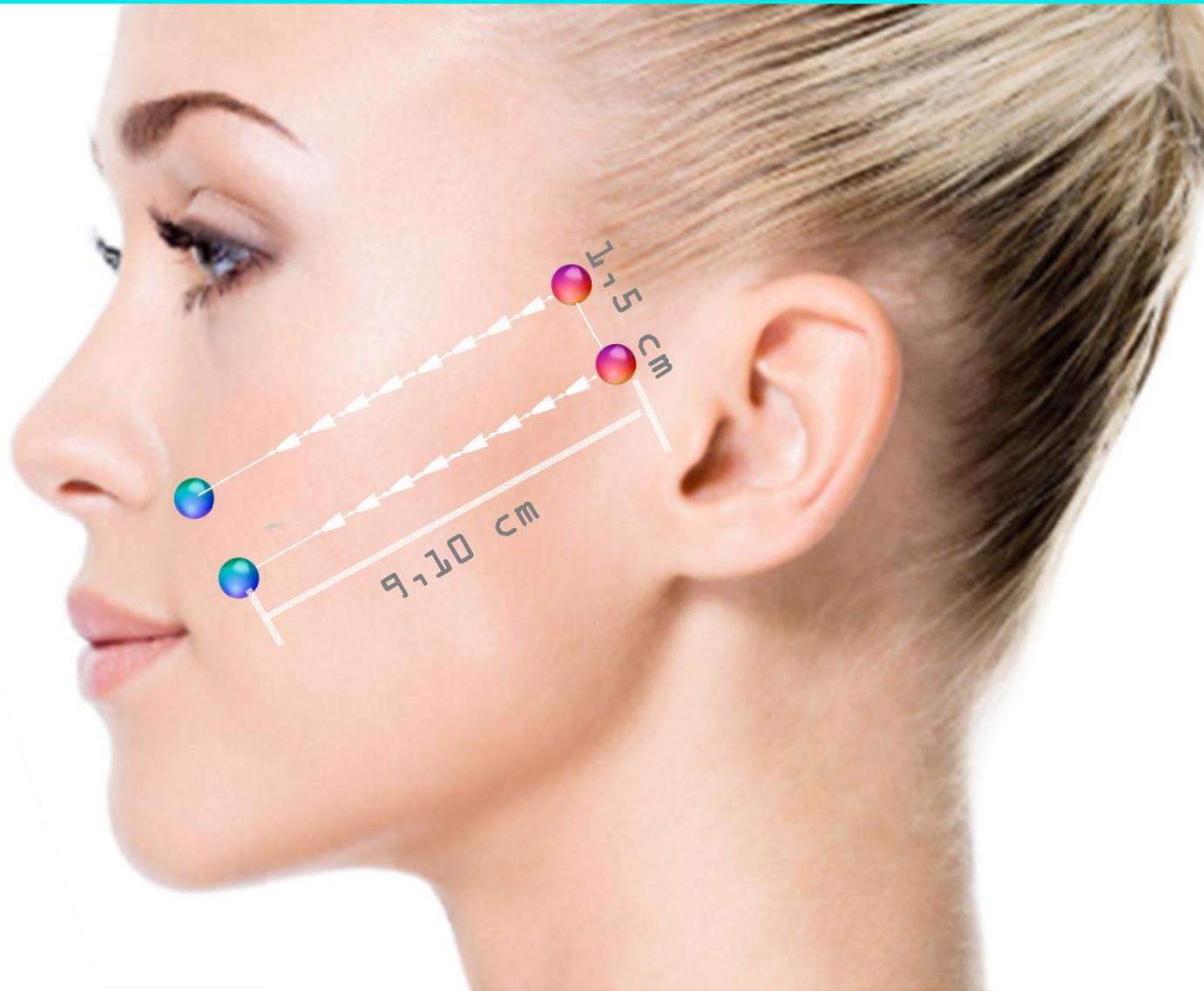

\* Abhängig von der Fadenstärke


# U-TECHNIK

  
SILHOUETTE SOFT™

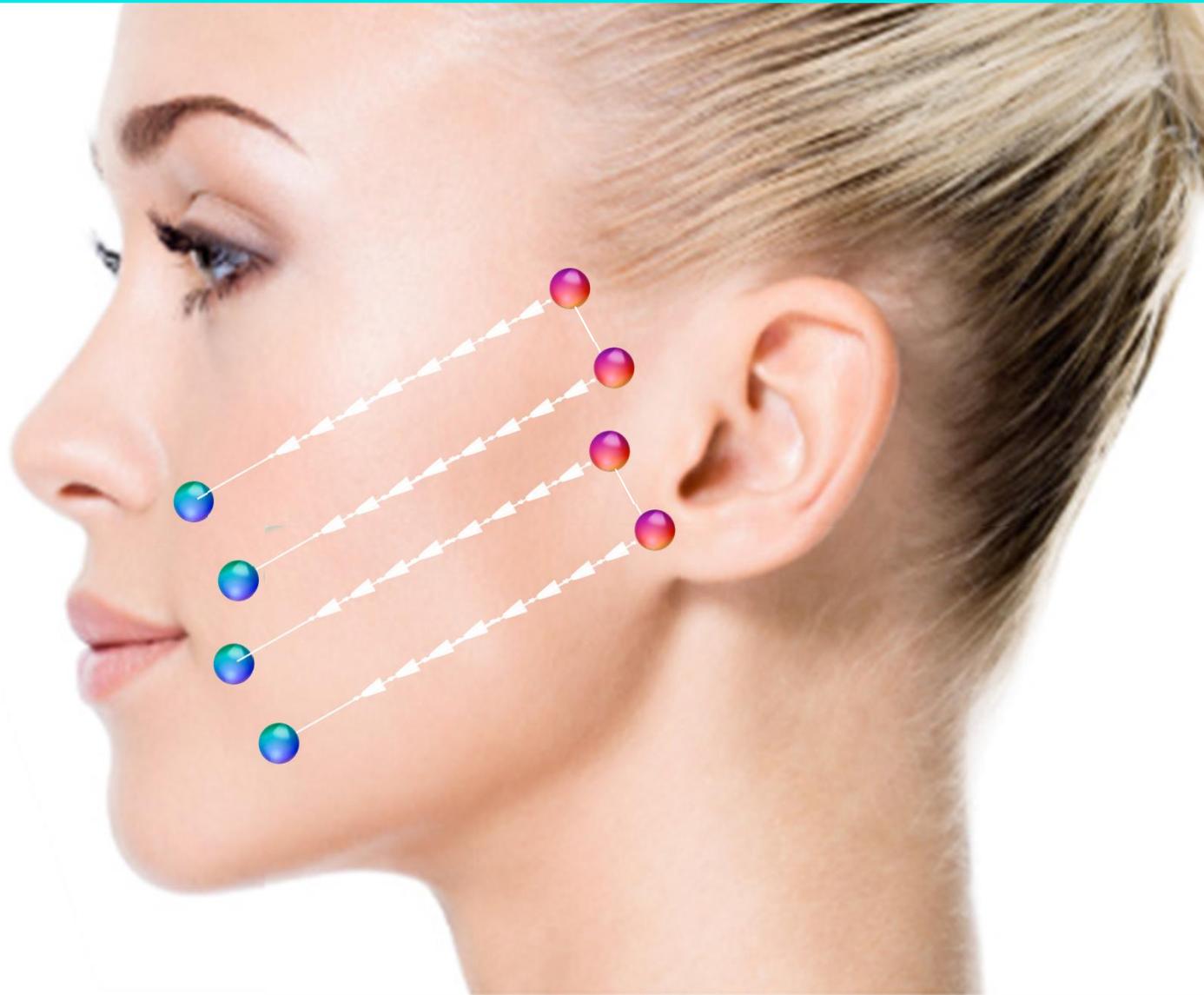

# U-TECHNIK

  
SILHOUETTE SOFT™

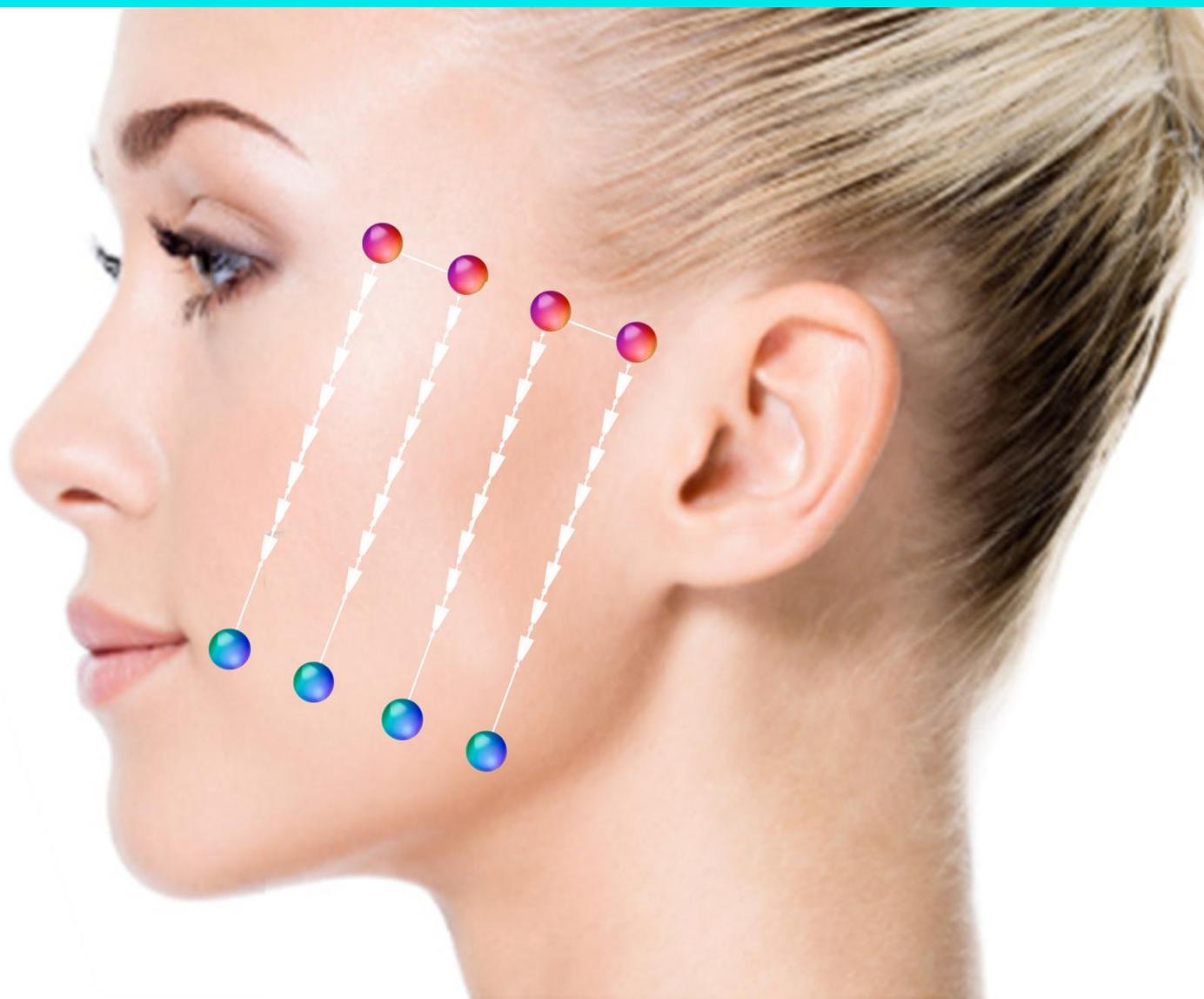



FALLBEISPIELE

# ERGEBNISSE JAW LINE; WANGEN

  
SILHOUETTE SOFT®



**Vorher**

**Nachher**

# ERGEBNISSE JAWLINE, WANGEN

  
SILHOUETTE SOFT®



**Vorher**



**Nachher**

# ERGEBNISSE JAWLINE, WANGEN

  
SILHOUETTE SOFT®



Vorher



Nachher

# ERGEBNISSE JAWLINE, WANGEN

  
SILHOUETTE SOFT®



**Vorher**

**Nachher**

# ERGEBNISSE JAWLINE, WANGEN

  
SILHOUETTE SOFT®



Vorher



Nach 15 Tagen

# ERGEBNISSE JAWLINE, WANGEN

  
SILHOUETTE SOFT®



Vorher



Nach 15 Tagen

# ERGEBNISSE JAWLINE, WANGEN

  
SILHOUETTE SOFT®



Vorher



Nach 4 Monaten

# ERGEBNISSE JAWLINE, WANGEN

  
SILHOUETTE SOFT®



**Vorher**



**Nach 4 Monaten**

# ERGEBNISSE JAWLINE, WANGEN

  
SILHOUETTE SOFT®



Vorher



Nach 30 Tagen

# ERGEBNISSE JAWLINE, WANGEN

  
SILHOUETTE SOFT®



**Vorher**



**Nach 30 Tagen**

## Eine Woche nach der Behandlung



**Vor der Behandlung**



**5 Monate danach**



**9 Monate danach**

## Vor der Behandlung



**1,5 Jahre danach**



**2 Jahre danach**



POST TREATMENT

# NACH DER BEHANDLUNG

- “ Der Patient sollte in den ersten drei Nächten mit erhöhtem Kopf (mindestens 30° - zwei Kissen unterlegen) schlafen
- “ In den ersten 24 Stunden Kühlkompressen auf das behandelte Areal legen (alle 40 Minuten für maximal 20 Minuten).
- “ Drei (3) Wochen nach der Behandlung jeden direkten Druck auf das behandelte Areal, in dem die Fäden platziert wurden, vermeiden. (z.B.: Liegen auf dem Gesicht beim Schlafen, etc.)
- “ Normale Körperpflege (Haare/Gesicht waschen) ist möglich
- “ Extreme Gesichtsbewegungen in dem behandelten Bereich in den ersten drei (3) Wochen vermeiden, z.B. exzessives Kauen, Reden, Gähnen, Lachen oder andere Bewegungen, die den behandelten Bereich tangieren. Das Trinken mit einem Strohhalm vermeiden

**Empfehlungen:** Silhouette Soft Fäden sollten nicht angewendet werden bei:

- Allergien oder Unverträglichkeiten gegen die Fadenkomponenten (Biomaterial).
- Permanenten Fillern im geplanten Behandlungsbereich
- Akuten oder chronischen Hautkrankheiten
- Autoimmunerkrankungen
- Schwangerschaft oder Stillzeit
- Sepsis oder Infektion
- Patienten mit eingeschränkter Bereitschaft, ihre Aktivitäten während der Heilungsperiode einzuschränken und den Anweisungen zu folgen.
- Patienten unter 18 Jahren